

Comprinet® pro

INFORMACJA O PRODUKCIE

COMPRINET® PRO

PROFESJONALNA OPIEKA
I NIEPOWTARZALNY KOMFORT




THERAPIEN. HAND IN HAND.

BSN medical

COMPRINET® PRO

PROFESJONALNA OPIEKA I NIEPOWTARZALNY KOMFORT

Comprinet® pro to pończochy i podkolanówki przeciwzakrzepowe, które skutecznie zapobiegają zakrzepicy oraz zatorowości płucnej u osób unieruchomionych. Łączą skuteczność medyczną i bezpieczeństwo z komfortem i wygodą pacjentów i użytkowników.

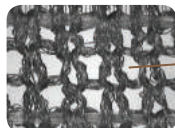

wysoce rozciągliwa i przepuszczająca powietrze dzianina



delikatne dla skóry wykończenia pończoch

wyraźnie zaznaczona pięta

oznaczone kolorem okienka rewizyjne

Dwukierunkowa rozciągliwość

Miękka, przyjazna dla skóry i przepuszczająca powietrze dzianina zapewnia komfort. Rozciągliwość wzdłużna i poprzeczna w połączeniu z profilowaniem kształtu nogi gwarantuje prawidłowy gradient ciśnienia, nawet w przypadku ekstremalnych kończyn.

Anatomiczne dopasowanie

Wyprofilowanie pięty i stopy, dzianina bez dodatku lateksu, antypoślizgowe wykończenie ud dają stabilne dopasowanie wyrobów i utrzymywanie się wyrobu na nogach z zachowaniem optymalnego gradientu ciśnienia.

Okienko rewizyjne w obszarze palców

Okienko rewizyjne u nasady palców po stronie grzbietowej stopy pozwala na łatwą i szybką ocenę bezpieczeństwa.

Szeroki zakres rozmiarów

Comprinet® pro można dobrać dla większości pacjentów: dla obwodów łydek (punkt pomiaru C) do 66 cm oraz dla obwodów ud (punkt pomiaru G) do 90 cm.

Łatwy dobór rozmiaru


Comprinet® pro dostępny jest w 10 rozmiarach (5 obwodów i 2 długości) dla zapewnienia idealnego dopasowania dla większości pacjentów. Kolorowe oznaczenia okienka rewizyjnego ułatwia szybką identyfikację i dobór rozmiaru.

Efektywność ekonomiczna

Trwała dzianina Comprinet® pro na bazie włókien poliamidowych gwarantuje kompresję na właściwym poziomie do 10 prań.

Stopniowalność kompresji

Kompresja w wyrobach Comprinet® pro wynosi na poziomie kostki około 18 mmHg i zmniejsza się stopniowo od części dystalnych do proksymalnych. Skutecznie zwiększa przepływ krwi do serca, zapobiega zastojom żylnym i tworzeniu się zakrzepów w układzie żył głębokich.

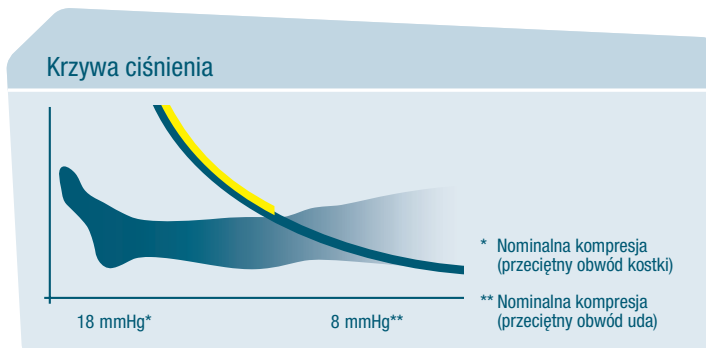

Wskazania

Profilaktyka zakrzepicy u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym oraz u pacjentów przez dłuższy czas unieruchomionych.

Przeciwwskazania

Niedokrwienie (np. zaawansowana choroba tętnic), niekontrolowana, zastoinowa niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, siniczy obrzęk bolesny.

Względne przeciwwskazania

Stosować tylko po konsultacji lekarskiej w przypadkach: zakażenia skóry, sączącej dermatozy, reakcje niedostosowania do materiału, zaburzenia wrażliwości, u pacjentów przyjmujących leki wazopresyjne, które mogą powodować skurcz naczyń obwodowych oraz u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Inne zalecenia

Błąd pomiaru i złe dopasowanie wyrobów mogą wywołać działania niepożądane. Otwarte rany muszą być zabezpieczone odpowiednim opatrunkiem.

Należy regularnie dokonywać oceny reakcji neuronaczyniowych wykorzystując do tego okienko rewizyjne.

Co najmniej raz dziennie należy wyroby zdjąć do higieny skóry i inspekcji. Wyroby powinny być prane co najmniej co trzy dni.


















Czas trwania aplikacji

Od kilku dni (łącznie z nocą) do kilku tygodni.

COMPRINET® PRO

PROFESJONALNA OPIEKA I NIEPOWTARZALNY KOMFORT

Tabela rozmiarów

| Rozmiar | Obwód  Kolor oznaczenia Obwód tydki | Długość  Długość nogi | Maksymalny obwód uda | Kolor oznaczenia | Nr katalogowy |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|---------------|
| pończochy (opakowanie: 10 par) | | | | | |
| 1 | small 23–30 cm | regular 64–80 cm | 86 cm |  | 4633500 |
| 2 | | long 80–97 cm | 86 cm |  | 4633600 |
| 3 | medium 30–38 cm | regular 64–80 cm | 86 cm |  | 4633700 |
| 4 | | long 80–97 cm | 86 cm |  | 4633800 |
| 5 | large 38–46 cm | regular 64–80 cm | 86 cm |  | 4638800 |
| 6 | | long 80–97 cm | 86 cm |  | 4638900 |
| 7 | x-large 46–53 cm | regular 64–80 cm | 90 cm |  | 7712500 |
| 8 | | long 80–97 cm | 90 cm |  | 7712800 |
| 9 | xx-large 53–66 cm | regular 64–80 cm | 90 cm |  | 7713000 |
| 10 | | long 80–97 cm | 90 cm |  | 7713100 |
| podkolanówki (opakowanie: 10 par) | | | | | |
| 1 | small 23–30 cm | — | — |  | 7702600 |
| 2 | medium 30–38 cm | — | — |  | 7702700 |
| 3 | large 38–46 cm | — | — |  | 7702800 |
| 4 | x-large 46–53 cm | — | — |  | 7712400 |
| 5 | xx-large 53–66 cm | — | — |  | 7713300 |



SKŁAD

pończochy
77% Poliamid
19% Elastan
4% Neopren

podkolanówki
80% Poliamid
20% Elastan

