

Nowość

JOBST® UlcerCARE™



2 w 1
System skutecznej
terapii kompresyjnej
żylnych owrzodzeń
podudzi

JOBST®

Comfort, Health and Style!

NOWOŚĆ

JOBST® UlcerCARE™



2 w 1
System skutecznej
terapii kompresyjnej
żylnych owrzodzeń
podudzi

JOBST®

Comfort, Health and Style!

Zrozumieć żyłne owrzodzenia podudzi

Kompresję należy traktować jako najważniejszy element w terapii owrzodzeń żylnych. Jak wskazują liczne badania*, adekwatnie zastosowany ucisk wspiera przepływ żylny znacząco poprawiając hemodynamikę układu żył głębokich. Skutkuje to redukcją bólu, zwiększeniem mobilności i poprawą jakości życia pacjenta.


Jak powstają owrzodzenia podudzi?

Niewydolność żylna jest najbardziej powszechną przyczyną powstawania owrzodzeń podudzi. Zaburzenia w odpływie krwi żyłnej do serca wywołane są głównie złą pracą zastawek. W rezultacie reflux prowadzi do nadciśnienia żylnego, którego skutki uwidaczniają się także w naczyniach włosowatych (kapilarach). Składniki pokarmowe i tlen nie są rozprowadzane w skórze, co powoduje obumieranie tkanek i rozwój owrzodzenia podudzi.




80% owrzodzeń żylnych jest zlokalizowanych po wewnętrznej stronie podudzi


Prawidłowe funkcjonowanie zastawek żylnych

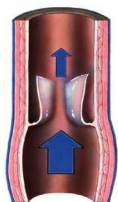

Otwarta zastawka
Krew może płynąć w kierunku serca

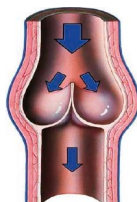

Zamknięta zastawka
Krew nie może płynąć w kierunku dystalnym

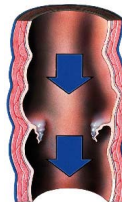

Uszkodzone zastawki powodują reflux żylny


Nieprawidłowe funkcjonowanie zastawek żylnych

Siła ucisku i rozciągliwość:


Jeśli odpływ żylny jest osłabiony, niezbędna jest adekwatna kompresja. Ponieważ mamy do czynienia z uszkodzeniem zastawek żylnych, rekomendowany jest długotrwały ucisk 40 mmHg* (lub wyższy) na poziomie kostki.

W tej sytuacji także stopień rozciągliwości wyrobów kompresyjnych staje się kluczowym czynnikiem decydującym o efekcie leczniczym. Im mniejsza rozciągliwość materiału kompresyjnego, tym wyższe ciśnienie robocze i lepszy efekt pracy mięśni.

Kompresja stwarza najlepsze warunki do wyleczenia owrzodzeń. Zmniejszenie objętości krwi żyłnej prowadzi do redukcji refluxu i nadciśnienia żylnego.

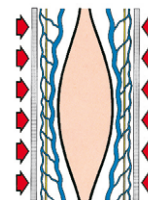

Ciśnienie działające stale z zewnątrz, przy mięśniach pozostających w spoczynku, nazywamy „ciśnieniem spoczynkowym”

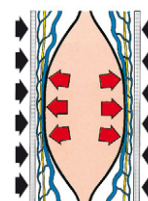


„Ciśnienie robocze” jest ciśnieniem działającym czasowo podczas pracy mięśni, w kierunku od wewnątrz do zewnątrz; zależne jest od pracy mięśni i w związku z tym od zwiększania się średnicy kończyny.

*dokument określający stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003

Wybór właściwego systemu kompresyjnego:

Terapia owrzodzeń żylnych jest holistyczna: zależy od wyboru właściwego systemu uciskowego dopasowanego indywidualnie dla każdego pacjenta i połączona jest - jeśli to niezbędne - z właściwą terapią obejmującą pielęgnację skóry i leczenie rany.

Przewlekła niewydolność żylna (CVI): schemat leczenia

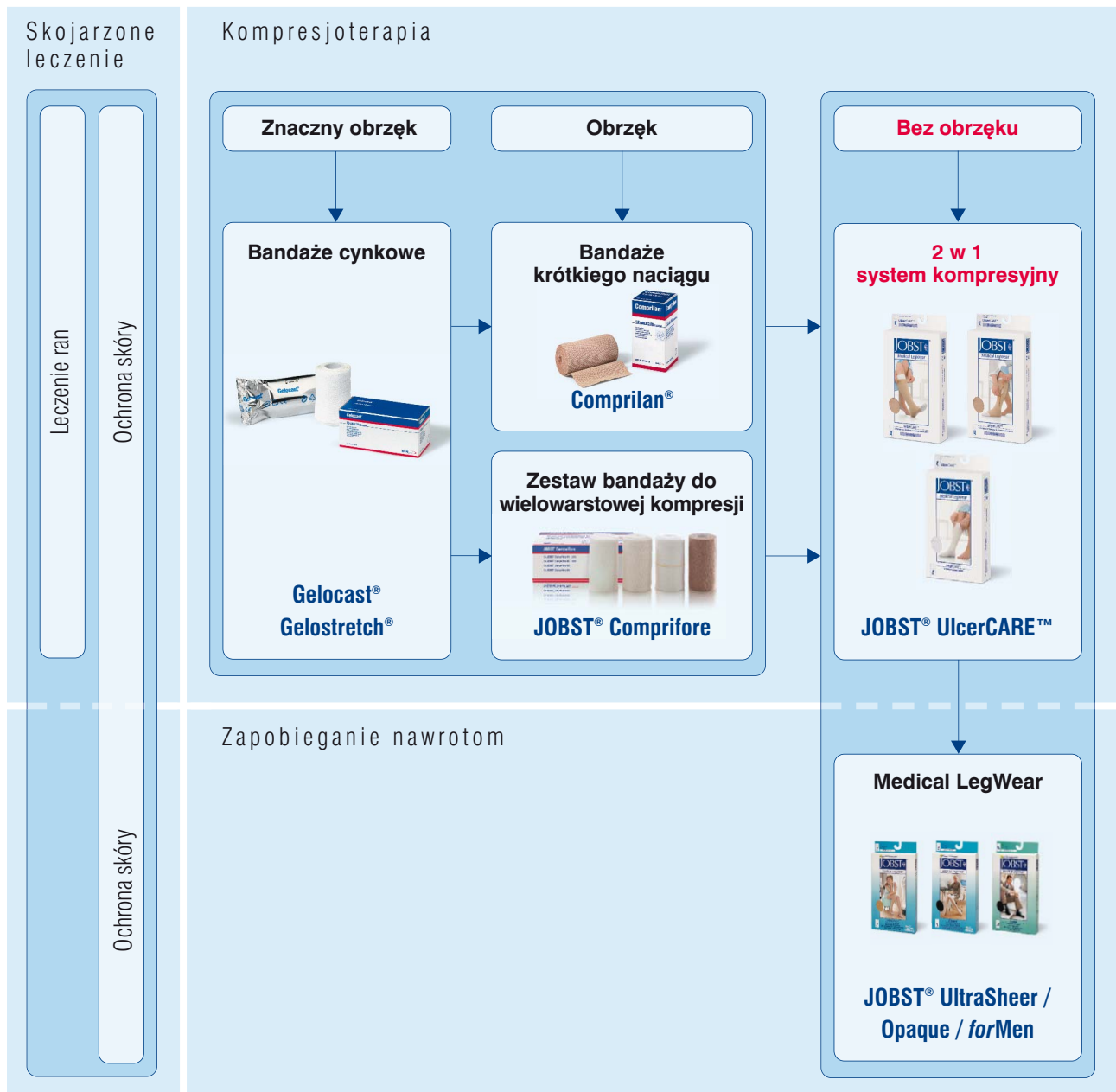

Po redukcji obrzęku, system kompresyjnej terapii 2 w 1 jest adekwatnym wyborem. Zapewnia nie tylko rekomendowany* stopniowalny ucisk, ale także maksymalną mobilność i komfort pacjenta.

*Dokument określający stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003

JOBST® UlcerCARE™

System kompresyjny zaprojektowany dla zapewnienia maksymalnej wygody pacjenta

JOBST® UlcerCARE™ umożliwia skuteczne leczenie żylnych owrzodzeń podudzi, a jednocześnie jest bardzo łatwy w nakładaniu. To perfekcyjne połączenie leczenia i wygody gwarantuje wysoką jakość życia.



Właściwości i korzyści: Udoskonalony system JOBST® UlcerCARE™

- **zapewnia stopniowalną kompresję i ucisk 40 mmHg****
aby uzyskać rekomendowane ciśnienie w przypadku leczenia żylnych owrzodzeń podudzi ***
- **zapewnia niski stopień rozciągliwości**
aby uzyskać skuteczne ciśnienie robocze
- **rozwiązanie 2 w 1**
dla łatwiejszego nakładania
- **jedwab w podkolanówce podkładowej**
dla łatwiejszego nakładania podkolanówki zewnętrznej
- **system szybkiego odprowadzania wilgoci**
dla większego komfortu
- **dostępny w 7 rozmiarach**
dla lepszego dopasowania różnych wielkości podudzi
- **kompatybilny z codziennym obuwem i odzieżą**
aby prowadzić normalne życie

Specjalnie zaprojektowany splot zewnętrznej podkolanówki powoduje zwiększenie tarcia obu podkolanówek, co zapewnia sztywność systemu i mniejszą rozciągliwość.

** Nominalny poziom kompresji dla przeciętnego rozmiaru kończyny na poziomie powyżej kostki.
***dokument określający stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003.

Właściwości i korzyści:

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka podkładowa



- **zapewnia łagodną kompresję pacjentom nieambulatoryjnym**
dla zabezpieczenia przed narastaniem obrzęku podczas leżenia
- **może być noszona 24 godziny na dobę**
dla utrzymania opatrunku na właściwym miejscu
- **zakryta cała stopa, także palce**
dla większego komfortu
- **zawiera jedwab**
dla ochrony skóry i łatwego nakładania
- **można prać w temperaturze 60°C**
dla zapewnienia higieny podczas wielokrotnego używania



JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka zewnętrzna



- **zaprojektowana do samodzielnego stosowania przez pacjenta**
dla łatwej zmiany opatrunku i dbałości o higienę osobistą
- **niewielkie tarcie z podkolanówką podkładową**
dla łatwiejszego nakładania
- **wyprofilowana okolica pięty i stopy**
dla większego komfortu
- **można prać w temperaturze 40°C**
dla zapewnienia higieny podczas wielokrotnego używania
- **dostępna w beżowym i czarnym kolorze**
dla dobrania do codziennej garderoby



Wersja z zamkiem błyskawicznym

- **ulepszony zamek błyskawiczny**
dla ułatwienia nakładania
- **zamek błyskawiczny od wewnętrznej lub zewnętrznej strony**
aby zamek błyskawiczny był po przeciwnej stronie owrzodzenia
- **ulepszony system zamykania zamka błyskawicznego**
aby zamek nie otwierał się podczas noszenia podkolanówki




JOBST® UlcerCARE™ Konkurencyjna przewaga

JOBST® UlcerCARE™ jest łatwy w nakładaniu

Zwykle większy poziom kompresji wiąże się ze zwiększonymi trudnościami w nakładaniu. Jednak poziom kompresji jest kluczowym czynnikiem w terapii i nie może być zmniejszony. JOBST® UlcerCARE™ łączy w sobie łatwość nakładania z niezbędnym poziomem kompresji.


- **Łatwość nakładania = wygoda pacjenta**

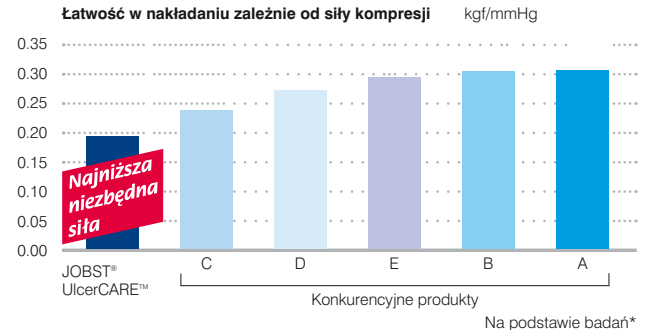

JOBST® UlcerCARE™ zapewnia doskonały poziom odprowadzania wilgoci przez cały dzień noszenia

Szybka absorpcja wilgoci daje pacjentowi wysoki komfort noszenia. Zarówno podkolanówka podkładowa, jak i podkolanówka wierzchnia JOBST® UlcerCARE™ charakteryzują się udowodnionymi zdolnościami szybkiej absorpcji wilgoci.


- **Odprowadzanie wilgoci = komfort pacjenta**

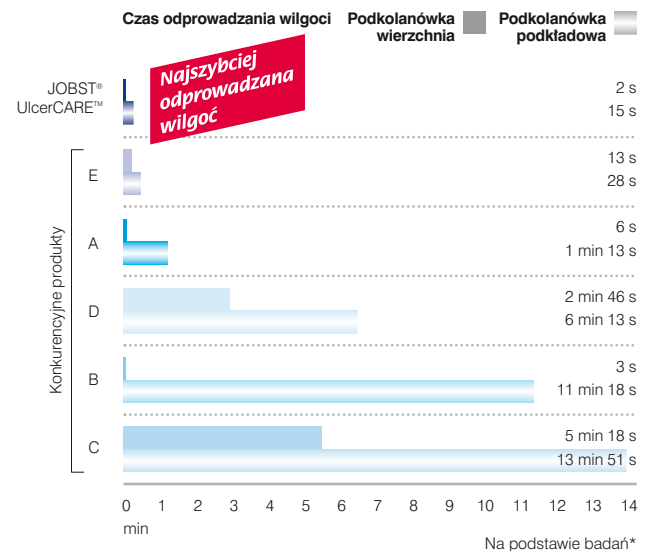

JOBST® UlcerCARE™ gwarantuje niezbędny poziom sztywności

Szywność systemu kompresyjnego, jak to zostało wykazane, koreluje z poprawą czasu przepływu krwi ** u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi. Jedynie indeks sztywności statycznej (ISS) większy niż 10 zapewnia poprawę terapii (przyspiesza gojenie) owrzodzeń żylnych.

- **Index sztywności > 10 = skuteczna kompresja**

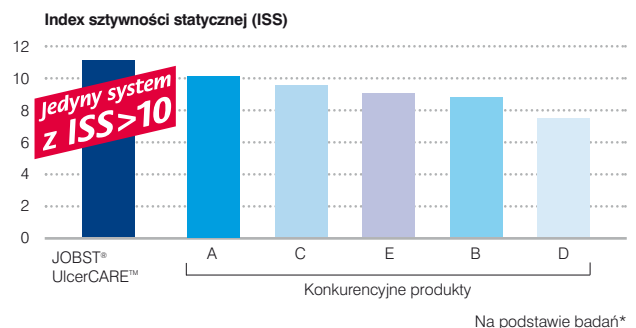



Nowy JOBST® UlcerCARE™ spełnia wszystkie wymagania systemu kompresyjnego dla osiągnięcia skutecznego leczenia owrzodzeń żylnych przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości życia pacjenta.

*Testy laboratoryjne mają na celu prezentację tego, jak działają produkty w kontrolowanych warunkach. Faktyczne efekty mogą się różnić.

JOBST® UlcerCARE™ teraz dostępny w 7 rozmiarach!

Nowa tabela rozmiarów JOBST® UlcerCARE™ została rozszerzona. Zamawiając system JOBST® UlcerCARE™ dobierz dokładnie rozmiar zgodnie z nową tabelą.

	b 		c 	
S	18 – 21 cm	7" – 8 1/4"	29 – 35 cm	11 1/2" – 13 3/4"
M	21 – 24 cm	8 1/4" – 9 1/2"	34 – 41 cm	13 3/4" – 16"
L	24 – 27 cm	9 1/2" – 10 3/4"	40 – 47 cm	15 3/4" – 18 1/2"
XL	27 – 30 cm	10 3/4" – 12"	46 – 54 cm	18" – 21 1/4"
2XL	30 – 33 cm	12" – 13"	48 – 56 cm	19" – 22"
3XL	33 – 36 cm	13" – 14"	50 – 58 cm	19 3/4" – 23"
4XL	36 – 39 cm	14" – 15 1/4"	52 – 60 cm	20 1/2" – 23 3/4"

Rozszerzony zakres rozmiarów = produkt pasuje niemal dla każdego pacjenta

Skład:

Podkolanówka podkładowa: Nylon/Poliamid: 79%, Spandex/Elastan: 16%, Jedwab: 5%

Podkolanówka wierzchnia: Nylon/Poliamid: 76%, Spandex/Elastan: 24%

JOBST® UlcerCARE™ najważniejsze informacje:

- łatwy w nakładaniu
- łatwy w użytkowaniu dla pacjentów i ich opiekunów
- wysoki komfort noszenia
- gwarancja skutecznej kompresji
- dostępny w wersji z zamkiem błyskawicznym lub bez
- dostępny w 7 rozmiarach

Prezentujemy produkty do ochrony i pielęgnacji skóry oraz opatrunki Cutimed® do leczenia ran



Cutimed® ACUTE

Łagodna, kremowa pianka z moczniakiem dla bardzo wymagającej skóry, zalecana do stosowania pod wyroby kompresyjne.



Cutimed® Sorbact®

Antybakteryjny opatrunek do ran o różnym poziomie wysięku.



Cutimed® Siltect®

Opatrunek piankowy dla utrzymywania rany w wilgotnym środowisku.

Szczegóły zamówienia

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka wierzchnia i podkolanówki podkładowe



Rozmiar Opakowanie zawiera 1 podkolanówkę wierzchnią i 2 podkolanówki podkładowe

	Czarna	Beżowa
S	73630-00041-00	73630-00021-00
M	73630-00042-00	73630-00022-00
L	73630-00043-00	73630-00023-00
XL	73630-00044-00	73630-00024-00
2XL	73630-00045-00	73630-00025-00
3XL	73630-00046-00	73630-00026-00
4XL	73630-00047-00	73630-00027-00

W sytuacji, gdy żaden z gotowych rozmiarów nie jest odpowiedni dla pacjenta, istnieje możliwość wykonania wyrobu na miarę. W takim przypadku prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka wierzchnia z zamkiem błyskawicznym i podkolanówki podkładowe



Rozmiar Opakowanie zawiera 1 podkolanówkę wierzchnią z zamkiem błyskawicznym i 2 podkolanówki podkładowe

Rozmiar	Czarna		Beżowa	
	Umiejscowienie zamka błyskawicznego		Umiejscowienie zamka błyskawicznego	
	po lewej stronie	po prawej stronie	po lewej stronie	po prawej stronie
S	73631-00041-00	73631-00071-00	73631-00021-00	73631-00061-00
M	73631-00042-00	73631-00072-00	73631-00022-00	73631-00062-00
L	73631-00043-00	73631-00073-00	73631-00023-00	73631-00063-00
XL	73631-00044-00	73631-00074-00	73631-00024-00	73631-00064-00
2XL	73631-00045-00	73631-00075-00	73631-00025-00	73631-00065-00
3XL	73631-00046-00	73631-00076-00	73631-00026-00	73631-00066-00
4XL	73631-00047-00	73631-00077-00	73631-00027-00	73631-00067-00

- Zamek błyskawiczny powinien być umiejscowiony po przeciwnej stronie lokalizacji owrzodzenia.

JOBST® UlcerCARE™ zapasowe podkolanówki podkładowe



Rozmiar Opakowanie zawiera 3 sztuki podkolanówek podkładowych

	Białe
S	73632-00021-00
M	73632-00022-00
L	73632-00023-00
XL	73632-00024-00
2XL	73632-00025-00
3XL	73632-00026-00
4XL	73632-00027-00

Dodatkowe informacje pomocne w skutecznej terapii:



Broszura dla pacjenta na temat podstawowych informacji dotyczących terapii uciskowej oraz właściwego stosowania JOBST® UlcerCARE™



Wytyczne dotyczące leczenia ran, w tym owrzodzeń podudzi.

Proszę zapoznać się z informacją dołączoną do produktu, zawierającą kompletne instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu.